


An - und Ausziehen eines Mund- und Nasenschutzes.

Anziehen:

1. Maske auf Defekte untersuchen.
2. Oberkante der Maske korrekt ausrichten – biegsame Seite nach oben.
3. Darauf achten, dass die richtige Seite der Maske nach außen zeigt.
4. Mit den Verschlussbändern an der hinteren Kopfmittle und Nacken befestigen oder mit Ohrenschlaufen hinter den Ohren.
5. Nasenbügel anpassen.
6. So dicht und angenehm wie möglich an das Gesicht anpassen.

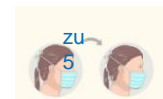


Ausziehen:

1. Desinfizieren der Hände mit einem alkoholischen Händedesinfektionsmittel (Einwirkzeit 30 Sekunden).
2. Zuerst das untere Band, dann das obere Band lösen oder Ohrenschlaufen von den Ohren ziehen.
3. Maske entfernen ohne die Vorderseite zu berühren.
4. Maske in das bereitgestellte Behältnis entsorgen.
5. Desinfizieren der Hände mit einem alkoholischen Händedesinfektionsmittel (Einwirkzeit 30 Sekunden).



zu 4

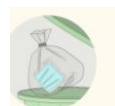

zu 5

